


Guide de l'utilisateur DEA



Commencer ici



Appareil équipé pour traiter des patients adultes et pédiatriques.

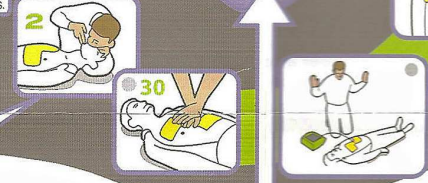

Autres messages vocaux éventuels:
 Brancher le câble. Connecter le câble de l'électrode.
 Appareil hors service. Éteindre puis allumer l'appareil. Si l'appareil est toujours hors service, commencer la réanimation.
 Relâcher le bouton de choc. Relâcher le bouton de choc.
 Remplacer les piles. Remplacer les 10 piles.
 (n) chocs délivrés

Le témoin lumineux clignote.
 Commencer la réanimation.
 Effectuer une RCR:
 2 insufflations toutes les 30 compressions.

Après un choc...

Le témoin lumineux clignote.
 Ne pas toucher la victime. Analyse en cours.
 Message de mise en garde **RECULEZ-VOUS.. NE PAS toucher la victime !**
 Choc délivré dans trois, deux, un...
 La tonalité de choc retentit. Choc délivré.

Après 2 minutes de RCR... Arrêter la réanimation.

Le témoin lumineux clignote.
 Ne pas toucher la victime. Analyse en cours.

Choc déconseillé.

Le témoin lumineux clignote.
 Vérifier l'état de conscience.
 Secouer la personne et l'interpeller.

Le témoin lumineux clignote.
 Demander de l'aide.
 Demander de l'aide (envoyer quelqu'un le cas échéant).


Le témoin lumineux clignote.
 Ouvrir les voies respiratoires.
 Tourner la personne sur le dos et dégager les voies respiratoires en faisant basculer la tête en arrière et en soulevant le menton; Placer la main sur le front et incliner doucement la tête vers l'arrière; En plaçant le bout des doigts sous la pointe du menton de la personne, lui soulever le menton pour dégager les voies respiratoires.
 Option: Placer le système de réanimation passive PASS (Passive Airway Support System) sous les épaules pour basculer la tête. NE PAS utiliser le système PASS en cas de suspicion de traumatisme crânien ou cervical.

Si la personne n'est pas consciente, dégager les voies respiratoires.

Le témoin lumineux clignote.
 Vérifier la respiration.

Vérifier la respiration.
 Regarder si le thorax se soulève;
 Rapprocher l'oreille de la bouche de la personne pour écouter s'il y a une respiration;
 Sentir sur votre peau l'air expiré;
 Déterminer si la respiration est normale, anormale ou absente.

Le témoin lumineux clignote.
 Appliquer les électrodes de défibrillation sur la poitrine nue du patient.
 Appliquer les électrodes adulte ou nourrisson/enfant sur la poitrine nue du patient.
 Suivre les instructions de l'emballage des électrodes.

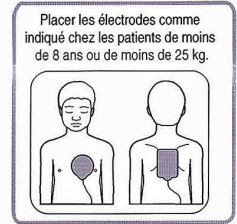

ZOLL

23/01/2013